

Instructies om de SilverFit Mile online te zetten

Indien u de SilverFit Mile met het internet verbindt via een kabel, zijn de online toepassingen direct te gebruiken.

Indien u de SilverFit Mile met het wifinetwerk verbindt, dient u de volgende stappen te doorlopen.

Stap 1: Het Netwerkstatus-paneel openen:

Zet de computer aan en wacht tot de SilverFit Mile volledig is opgestart.

Open met de menuknop in de rechterbovenhoek.



Klik vervolgens op **'Internet'**. Bij deze wordt de netwerkstatus van het systeem weergegeven.





Stap 2: Verbinden met het netwerk:





Selecteer het gewenste Wifinetwerk en vul indien nodig het wachtwoord in.

Let op! Maak geen verbinding met netwerken waarbij u met persoonlijke gegevens moet inloggen of met een bedrijfsnetwerk waar cliëntgegevens worden opgeslagen. De voorkeur gaat uit naar een gastennetwerk.







Netwerkstatus controleren

Zet de computer aan en wacht tot de SilverFit Mile volledig is opgestart. Open de menuknop in de rechterbovenhoek.



U kunt op de knop 'Internet' controleren of het systeem verbonden is met het internet. Als er geen verbinding is, kunt u op de knop klikken voor hulp bij het verbinden met een netwerk.



