

Cher client SilverFit 3D,

Vous venez de recevoir la mise à jour du logiciel SilverFit 3D pour 2026. Dans ce courrier, nous vous expliquons les changements et les améliorations apportés à cette version du logiciel.

1. Jour de lessive – Retirons le linge de la corde à linge

- Entraînez-vous au transfert assis-débout ou à vous pencher en avant
- Permet d'ajouter un défi cognitif
- Disponible en mode individuel ou deux joueurs
- Exercice personnalisable en fonction des capacités fonctionnelles et cognitives du patient



Nous avons développé un nouvel exercice : la corde à linge. Cet exercice se concentre sur l'entraînement aux transferts assis-débout et aux flexions du tronc vers l'avant en position assise.

Différents vêtements se déplacent le long d'une corde à linge. Lorsqu'un vêtement passe devant le personnage à l'écran, celui-ci peut être retiré de la corde en se levant ou en se penchant vers l'avant. La récompense consiste à plier le linge dans le panier à linge. Évitez de retirer le linge sale de la corde !

Les paramètres de l'exercice peuvent être ajustés en fonction des capacités du patient :

Sélectionnez la difficulté du mouvement : Le transfert de la position assise à la position debout peut être adapté aux besoins thérapeutiques du client. Pour inciter votre patient à démarrer le mouvement en se penchant vers l'avant, ce qui exige un contrôle postural et une force musculaire efficaces, l'option 'se pencher en avant' peut être choisie. Cette option doit être sélectionnée et n'est pas activée par défaut.

Ajoutez un défi cognitif : Mettez vos patients au défi de distinguer le linge sale du linge propre. Le linge sale doit être laissé sur la corde à linge et le linge propre placé dans le panier. De plus, vous pouvez préciser la couleur ou le type de vêtement que le client doit retirer de la corde à linge.

Temps de réaction : Ajustez la vitesse de réponse afin que vos patients puissent effectuer l'exercice à un niveau stimulant. Les vêtements peuvent s'arrêter momentanément devant le client avant de continuer, lui laissant suffisamment de temps pour réagir. Il est possible de régler la vitesse à laquelle les vêtements se déplacent sur la corde à linge.

2. Temps de démarrage plus rapide pour les exercices

Pour cette mise à jour, nous nous sommes concentrés sur le processus de démarrage de nos exercices. Certains utilisateurs nous ont signalé que celui-ci pouvait parfois être long, ce qui représente une perte de temps précieux. Nous comprenons parfaitement et souhaitons contribuer à optimiser le temps de la séance. Nous avons apporté quelques améliorations qui devraient accélérer le processus de démarrage.

Il est important de prendre en compte que le temps de démarrage dépend également du matériel utilisé (par exemple, le modèle et l'âge de l'ordinateur). Sur certains systèmes, le temps de démarrage sera sensiblement amélioré par rapport à d'autres. Si, après cette mise à jour, vous estimez toujours que le démarrage de l'exercice est lent, n'hésitez pas à prendre contact avec notre service client (support@silverfit.nl) pour discuter des options de mise à niveau de votre matériel.

3. L'exercice de la Récolte de tomate prend en charge l'utilisation d'un déambulateur

La récolte de tomates entraîne la flexion de l'épaule dans le plan scapulaire. Dans cette version, nous avons adapté le jeu pour qu'il puisse être utilisé avec un déambulateur. La récolte de tomates est un exercice très fonctionnel, car la flexion de l'épaule est nécessaire dans de nombreuses activités du quotidien. Par exemple, à l'ouverture d'une porte à l'aide d'un déambulateur.



4. Changements sur Windows

L'ordinateur sur lequel est installé le logiciel SilverFit 3D utilise Windows. Microsoft a mis récemment fin au support de Windows 10, signifiant qu'aucune mise à jour de sécurité ne sera plus publiée. Cela pourrait affecter les systèmes régulièrement connectés à Internet. Dans ce cas, nous recommandons de passer à Windows 11. Si le système n'est pas connecté à Internet, le risque est très faible.

Remarque : l'installation de Windows 11 peut s'avérer plus complexe qu'une mise à jour classique de Windows ou d'un logiciel. Nous vous recommandons de faire appel à une personne disposant de connaissances techniques en informatique, comme un informaticien, pour effectuer l'installation. L'installation peut prendre au moins une journée ouvrable, pensez donc à vous organiser en conséquence.

Conscients que cette étape peut s'avérer compliquée, nous avons ajouté un outil au logiciel : l'assistant de mise à niveau Windows. Cette fonctionnalité vous indiquera clairement les étapes à suivre en fonction de votre système. Vous trouverez cet outil dans le menu. Démarrez le processus en cliquant sur Assistant de mise à niveau Windows (cette fonctionnalité ne fonctionne que si une connexion Internet est disponible).

Nous sommes en train de travailler sur la prochaine mise à jour. Si vous avez des suggestions ou des idées, n'hésitez pas à nous en faire part par e-mail à l'adresse silverfit@silverfit.nl ou par téléphone au (+31) 348 769 110.

Cordialement,

L'équipe SilverFit