

Chers utilisateurs du SilverFit Alois,

Vous venez de recevoir la clé USB contenant la mise à jour 2025 du logiciel SilverFit Alois. Dans ce courrier, nous vous présentons les principales modifications et améliorations apportées dans cette nouvelle version du logiciel.

1. Quelles activités puis-je proposer et réaliser avec mes résidents ?

Cette situation vous est sans doute familière : vous êtes devant l'Alois, conscient de la richesse des activités proposées, mais vous choisissez automatiquement les vidéos d'animaux... à nouveau. Trouver le temps d'explorer de nouvelles activités et de découvrir toutes les possibilités offertes par Alois n'est pas toujours facile, et nous le comprenons parfaitement.




C'est pourquoi nous avons ajouté un touche sur l'écran d'accueil afin de vous fournir plus d'informations sur l'utilisation de du SilverFit Alois. Vous y trouverez des conseils pour utiliser les différentes activités du système. Nous avons inclus ces informations dans un document qui classe les activités selon le type de séance : individuelle, en petit groupe (de 2 à 4 personnes) ou en grand groupe.

Votre avis nous intéresse ! N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions concernant ces informations.

2. De nouvelles photos réalistes pour les jeux de mémoire de la catégorie « Activités tactiles »

Lorsque vous lancez les activités 'Reconstituer les paires' ou 'Memory', vous pouvez désormais choisir entre des illustrations et des photographies.

Le SilverFit Alois étant utilisé par un public très varié, nous avons reçu des commentaires selon lesquels le jeu original ne convenait pas toujours aux à tous les résidents / patients.

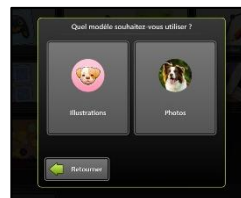

Grâce à l'ajout de photos réalistes en complément des dessins existants, ces activités s'adaptent désormais à un public encore plus large.

Jouez au 'Memory' avec un résident ou faites-en une activité familiale conviviale lorsque les petits-enfants viennent rendre visite à leurs proches. Le jeu commence avec un niveau simple de 4 cartes à mémoriser, et au fur et à mesure que les correspondances sont trouvées, la difficulté augmente progressivement. Chacun peut ainsi profiter du jeu à son rythme, avec un niveau de défi adapté à ses capacités.

Cette activité est disponible dans la rubrique « **Activités tactiles** ».

3. Nouveaux films : Jardins de Claude Monet et l'Aquarium SeaLife Paris

Dans cette nouvelle mise à jour, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir l'atmosphère paisible et colorée des célèbres jardins de Claude Monet à Giverny. Vous pourrez également vous immerger dans le fascinant monde sous-marin de l'aquarium Sea Life Paris.



Vous trouverez le nouvel itinéraire dans la rubrique «Activités de promenade/randonnées ».

Les itinéraires de randonnées peuvent être utilisés de trois manières différentes :

1. Comme activité d'observation et de découverte : Lancez simplement le film de la visite afin qu'un groupe de résidents puisse le regarder ensemble. Cette expérience favorise les échanges, les souvenirs et les conversations agréables.
2. Comme une activité pour bouger : le film se mettra en route lorsque la caméra détectera les mouvements du résident. S'il arrête de bouger, le film est mis en pause. Pour activer cette fonctionnalité, utilisez le bouton « **Modifier** » sur l'écran de sélection du film.
3. Comme une activité pour pédalage : Si un vélo ou pédalier équipé d'un capteur (fourni par SilverFit) est connecté, il est possible faire défiler le paysage en pédalant. Pour plus d'informations sur le pédalage avec un capteur, contactez-nous en utilisant les coordonnées figurant au bas de ce courrier.

4. Annulez votre dernier coup de crayon dans l'activité Peinture



Nous avons ajouté une petite fonctionnalité à l'activité Peinture : vous pouvez désormais annuler votre dernière action à l'aide du bouton de la gomme.

Pour beaucoup, le dessin et la peinture sont des passe-temps agréables. Tout le monde a déjà dessiné à un moment ou à un autre de sa vie. Dans cette activité, vous pouvez créer une peinture sur Alois en utilisant différentes couleurs et tailles de pinceau. Vous pouvez également en faire une activité de groupe en demandant aux participants de deviner ce que l'animateur ou un autre participant est en train de dessiner. Vous trouverez cette activité dans la rubrique Activités tactiles.

Windows 10

Les ordinateurs sur lesquels le logiciel **SilverFit Alois** est installé fonctionnent sous Windows. Dans la plupart des cas, il s'agit de **Windows 10**.

Microsoft cessera prochainement de prendre en charge Windows 10. Cela signifie qu'il n'y aura plus de mises à jour, ce qui peut représenter un risque pour la sécurité de l'ordinateur. Heureusement, ce risque est très limité, car le logiciel **SilverFit Alois** n'est pas connecté à Internet.

Si vous souhaitez néanmoins passer à **Windows 11**, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse **support@silverfit.nl**. Nous serons ravis d'étudier avec vous les différentes possibilités.

Si vous avez des idées ou des suggestions pour notre prochaine mise à jour, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone : silverfit@silverfit.nl ou +31 348 769 110.

Nous vous souhaitons de belles séances et beaucoup de plaisir à découvrir ces nouveautés.

L'équipe SilverFit