

Cher client SilverFit Mile,

La mise à jour 2026 du logiciel SilverFit Mile est désormais disponible au téléchargement. Nous sommes ravis de vous présenter les dernières fonctionnalités et mises à jour :

1. Nouvel astuce : visionnez d'un seul coup d'œil les nouveaux itinéraires 2025

Nous avons ajouté cette année de nombreux et nouveaux itinéraires que vous pouvez télécharger sur votre SilverFit Mile.

Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons créé un **aperçu annuel pratique** afin que vous et vos résidents puissiez profiter de tous les nouveaux parcours disponibles en 2025. Vous le retrouverez en cliquant sur *Menu* puis *Mise à jour du Logiciel* puis cliquer sur *Nouveautés de la mise à jour*.

2. Nouveauté : Album SilverFit

Cette année, nous avons fourni un nouvel album SilverFit sur le thème de l'Italie. Il a été utilisé lors de notre challenge cycliste et festif annuel, le Tour SilverFit Mile, et nous prévoyons de sortir d'autres nouveaux albums à l'avenir.

Les albums peuvent être utilisés avec la fonction "Album SilverFit" en haut de l'écran. Les photos apparaissent progressivement à l'écran et les résidents/patients peuvent deviner ce qui se trouve sur l'image.

A la fin, l'image complète reste désormais visible plus longtemps, ce qui encourage la conversation. Une fois révélée, nous avons ajouté une brève description de l'image. De cette façon, nous visons à stimuler à la fois la mémoire, la conversation et l'interaction sociale pendant l'activité.

3. Gestion simplifiée de l'espace disque dur (en cas de besoin)

Depuis « Gestion des itinéraires » accessible dans le Menu puis sur l'onglet « Libérer de l'espace disque », vous pouvez supprimer des itinéraires de votre système SilverFit Mile. Cela permet de garder votre système organisé et de mieux adapter les itinéraires disponibles aux préférences des résidents.

Tous les itinéraires restent disponibles et peuvent être téléchargés à nouveau à tout moment en cochant la case : « Afficher les itinéraires téléchargeables. » dans « Itinéraires », tant que vous disposez d'un contrat de service.

Dans cette mise à jour, nous avons facilité le choix des itinéraires à supprimer. En fonction de votre « fréquence » de lecture, les itinéraires sont triés selon cette « recommandation ». Ce tri permet de répertorier les itinéraires les moins utilisés du haut vers le bas. Il vous suffit de passer la souris sur un itinéraire pour afficher ses détails de lecture.

Tant que vous n'avez pas de message vous indiquant que vous manquez d'espace dans sur disque dur lorsque vous téléchargez un nouvel itinéraire, nous vous recommandons de ne pas supprimer de films.

4. Modifications apportées à Windows

L'ordinateur qui exécute le logiciel SilverFit Mile utilise Windows. Microsoft a annoncé que la prise en charge de Windows 10 a pris fin, ce qui signifie qu'il ne reçoit plus de mises à jour de sécurité. À terme, cela pourrait exposer les ordinateurs à davantage de risques en ligne, en particulier s'ils sont régulièrement connectés à Internet. Pour aider à maintenir votre système sécurisé et à jour, nous vous recommandons de passer à Windows 11.

Important :

L'installation de Windows 11 est un processus technique. Nous vous recommandons de faire appel à votre service informatique. L'installation est un processus long et technique.

Nous comprenons que la mise à jour de votre système peut sembler compliquée. C'est pourquoi nous avons ajouté un outil au sein du Menu qui vous fournira des informations sur la situation de votre SilverFit Mile et sur ce qui est nécessaire. La vérification de la mise à niveau Windows vérifiera l'état de votre ordinateur et vous donnera des conseils sur les étapes suivantes.

Cet outil est disponible dans le menu, après avoir cliqué sur « Mises à jour logicielles » puis « Vérification de la mise à niveau ».

Le Tour SilverFit Mile 2025 : encore un grand succès !

Nous revenons sur une édition fantastique, pleine d'enthousiasme et de sourires. Pas moins de 160 établissements aux Pays-Bas, en France, en Belgique et en Allemagne y ont participé. Au total, 2 327 résidents ont pédalé à travers la belle Italie pendant 182 minutes. Le participant le plus âgé avait 104 ans, une performance incroyable !

Revivez les meilleurs moments : découvrez notre aftermovie en exclusivité.



Des suggestions ou des idées ? Nous travaillons déjà sur la prochaine mise à jour. Vous avez une bonne idée pour le SilverFit Mile ? Partagez-la avec nous à l'adresse mile@silverfit.nl ou au 06 47 44 53 74

Cordialement

L'équipe SilverFit