

Woerden, december 2024

Beste SilverFit Rephagia-klant,

Vandaag ontvang je de software-update van 2024 voor de SilverFit Rephagia. In deze brief lees je welke verbeteringen we hebben aangebracht naar aanleiding van jullie feedback.

1. Minder vaak kalibreren

We krijgen regelmatig vragen over het kalibreren en waarom dit voorafgaand aan een oefening gedaan moet worden. Helaas blijft kalibreren een noodzaak wanneer een sessie gestart wordt, maar we hebben wel kritisch gekeken naar het aantal momenten waarop het systeem een kalibratie start. Dit hebben we kunnen terugbrengen.

Oefening starten

Oefening gebruikt eerdere kalibratiewaarden 

In principe is kalibreren nodig wanneer er iets verandert in de omstandigheden waarin de oefening uitgevoerd wordt. Een paar belangrijke factoren zijn:

- De plaatsing van de elektrodesticker
- Het type oefening dat gedaan wordt (Een slik-repetitie of een beweging die vastgehouden moet worden)
- De vermoeidheid van de cliënt

Wanneer deze omstandigheden gelijk blijven is het in principe niet nodig om opnieuw te kalibreren. In het systeem zal de kalibratie dan standaard overgeslagen worden en dit staat vermeld op het scherm waar je de oefening start. Je kunt dit aanpassen en alsnog een kalibratie uitvoeren door op de knop naast deze melding te drukken. Bijvoorbeeld wanneer je de elektrodesticker verplaatst hebt.

2. Beveiliging cliëntgegevens aangescherpt

Privacyregels worden steeds belangrijker. Op de SilverFit Rephagia wordt informatie opgeslagen en voor veel organisaties (en cliënten) is het van groot belang dat dit zo veilig mogelijk gebeurt. Daarom hebben we extra beveiligingsopties aangebracht aan de database om te voorkomen dat onbevoegden de opgeslagen cliëntgegevens kunnen inzien. De beveiliging hiervan is altijd in ontwikkeling en ook deze update is hieraan gewerkt. In het dagelijks gebruik van de SilverFit Rephagia merk je hier niets van.

3. Aanscherping van de feedback bij de kangoeroe-oefeningen

Vorig jaar hebben we iets meer feedback toegevoegd aan de kangoeroe-oefeningen. Waaronder een luchtwolkje wanneer er wel een slik geregistreerd wordt, maar deze niet de

doelwaarde overschrijdt. De kangoeroe bleek te vaak te reageren, bijvoorbeeld als cliënten veel extra spierbewegingen maken. Dankzij jullie feedback hebben we deze drempelwaarde kunnen aanscherpen.

4. Overige (kleine) wijzigingen:

- We hebben een succes-ratio toegevoegd aan het resultatenschermb. Zo zie je in één oogopslag welk percentage van de repetities succesvol waren.
- We hebben een aantal trainingvideo's bijgewerkt. De video die een introductie geeft van alle oefeningen in het algemeen en een video die extra uitleg geeft over de kangoeroe visualisaties zijn vernieuwd. Ook hebben we een nieuwe video toegevoegd voor de gecontroleerde slik oefening. Je vindt deze video's in de software bij 'handleiding'.
- Wanneer je backspace gebruikt om repetities weg te halen kan je nu maar één repetitie tegelijk verwijderen. Zo voorkom je dat je per ongeluk te veel repetities verwijdert.
- Je kunt kiezen welke slikscores er getoond worden in het systeem. Mocht op jouw locatie een andere score gebruikt worden dan de FOIS die standaard in het systeem staat kan je dit wijzigen via het Administrator-menu.

5. SilverFit voldoet aan nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen (MDR)

Achter de schermen is niet alleen gewerkt aan de nieuwe software-update maar hebben we ook gezorgd dat onze werkwijze aansluit bij de nieuwe wetgeving voor medische hulpmiddelen. Deze EU-wetgeving regelt een verbeterde cliëntveiligheid en klinische veiligheid van hulpmiddelen. De SilverFit Rephagia is geregistreerd met een UDI code in de Europese database voor medische hulpmiddelen.

Suggesties of ideeën?

We zijn altijd benieuwd naar jouw ervaringen met de SilverFit Rephagia. Heb je suggesties, ideeën of vragen over de software-update? Neem dan contact met ons op via info@silverfit.nl of bel naar 0348 769 110.

Hartelijke groet,

Team SilverFit