

Beste SilverFit Rephagia-klant,

Vandaag ontvang je de software-update van 2025 voor de SilverFit Rephagia. In deze brief lees je welke verbeteringen we hebben aangebracht naar aanleiding van jullie feedback.

1. Hulpkaart verbinden elektroden en sensoren

Voor wie de SilverFit Rephagia dagelijks gebruikt is het verbinden van de sensoren en de elektroden een fluitje van een cent. Voor wie dit minder regelmatig doet kan dit ingewikkelder zijn en soms zelfs een reden om het systeem te laten staan.

Dit vinden wij natuurlijk zonde en dus hebben we voor deze update een fysieke kaart gemaakt om hierbij te ondersteunen. De kaart laat stap voor stap zien hoe je de sensoren goed verbindt met de laptop en hoe je de elektrodesticker(s) moet bevestigen.



Bewaar deze kaart bij de sensoren in de laptoptas om hem altijd als geheugensteuntje bij de hand te hebben. Een digitale versie is op aanvraag beschikbaar.

2. Extra informatie bij streefwaarde (hoog) en streefwaarde (laag)

Tijdens trainingen en demonstraties krijgen wij nog wel eens de vraag wat je precies moet instellen bij de streefwaarden. Meestal is dit voor de hoge streefwaarde goed uit te leggen omdat dit het doel van de oefening vormt of nodig is in het spel. De lage streefwaarde is vaak lastiger omdat het niet direct duidelijk is wat het doet. Vaak heeft dit een functie die specifiek is voor een spel of grafiek en kan je deze aanpassen wanneer iemand bijvoorbeeld veel (onvrijwillige) spiercontracties heeft. Voor deze update hebben we extra informatie-velden toegevoegd aan de instellingen-menu's van alle oefeningen die uitlegt wat het doet en wanneer je het zou willen aanpassen.

3. Verduidelijking resultaten na timing-oefening

We hebben een verbetering aangebracht op het resultatenschermbild op afloop van een timing-oefening. Op het samenvattingstabblad zie je nu direct welke repetities correct en welke incorrect getimed waren op basis van de getoonde kleur. Dit ondersteunt bij het bespreken van de resultaten omdat het direct een duidelijk beeld geeft aan zowel de therapeut als de cliënt over hoe de oefening is verlopen.

4. Beveiliging cliëntgegevens aangescherpt

Privacyregels worden steeds belangrijker. Op de SilverFit Rephagia wordt informatie opgeslagen en voor veel organisaties (en cliënten) is het van groot belang dat dit zo veilig mogelijk gebeurt. Daarom hebben we ook voor deze update aandacht gehad voor extra beveiligingsopties aan de database, om te voorkomen dat onbevoegden de opgeslagen cliëntgegevens kunnen inzien. De beveiliging hiervan is altijd in ontwikkeling en ook in deze update is hieraan gewerkt. In het dagelijks gebruik van de SilverFit Rephagia zal je hier niets van merken.

5. Trainingvideo's bijgewerkt

We hebben een aantal trainingvideo's geüpdatet. Deze video's leggen uit hoe je het systeem kunt gebruiken. Bijvoorbeeld voor collega's die nog niet zo bekend zijn met het systeem. Je vindt deze video's in de software onder 'handleiding'.

6. Windows updates

De computers waarop de SilverFit Rephagia-software is geïnstalleerd, gebruiken Windows. Vaak is dit Windows 10. Microsoft stopt met het ondersteunen van Windows 10. Dat betekent dat er geen updates meer komen, en dat kan een risico zijn voor de veiligheid van de computer. Gelukkig is dat risico klein, omdat de Rephagia-software niet met het internet is verbonden.

Niet alle computers kunnen geüpdatet worden naar Windows 11. Overleg met je IT afdeling of dit voor jullie SilverFit Rephagia vereist is. Onze support-afdeling kan dan de mogelijkheden bespreken.

Suggesties of ideeën?

We zijn altijd benieuwd naar jouw ervaringen met de SilverFit Rephagia. Heb je suggesties, ideeën of vragen over de software-update? Neem dan contact met ons op via info@silverfit.nl of bel naar 0348 769 110.

Hartelijke groet,

Team SilverFit